

earnnet[®]
iřitme sistemleri

duymanın ötesi...

Made for
Apple iPhone | iPad

Kullanım Kılavuzu

- KULAK ARKASI (BTE)
- TIE MODÜLER
- RIC (RITE)
- OPEN FIT
- KULAK İÇİ (ITE)
- KANAL İÇİ (ITC)
- KANAL İÇİ (CIC)
- KANAL İÇİ (IIC)



earnnet.eu

Uygunluk Beyanı (Üretici Beyanı)

EAR TEKNİK İŞİTME VE ODİOMETRİ CİH. SAN. ve TİC. A.Ş./ 59930, Ergene/Tekirdağ bünyesinde ürettiği ürünleri, 14 Haziran 1993 (93/42/EEC) İla sınıfı Ek V-2007/47/ EC, IEC 60118-13: 2016 EMC direktifine uygun olarak piyasaya arz ettiğini ve ürüne ait her türlü sorumluluğun kuruluşun kendisine ait olduğunu bu belge ile taahhüt ve beyan etmektedir.

Depolama ve transport şartları:



Nakliye ve depolama esnasında sıcaklık: $-20^{\circ} / +60^{\circ}$ Celsius sınır değeridir.



Nem oranı: Sürekli %65'i aşmamalıdır.



Hava basıncı aralığı: İdeal 1100-500 hPa



Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

KK.01.02/01.01.2007/07.09.2022/24

Giriř

ear-teknik'in en modern metot ve teknolojilerle üretmiş olduđu iřitme sistemini almaya karar verdiđinizden dolayı sizi kutlarız.

Almış olduđunuz iřitme sistemi sınıfının tam donanımlı, en güvenilir, kullanımı ve bakımı kolay iřitme cihazdır.

Cihaz, size en iyi dođal ses konforunu ve her ortamda konuşmaları anlamanıza yardımcı olacak şekilde donatılmıştır.

İřitme cihazınızdan maksimum sonuç elde etmek ve cihazı dođru kullandıđınızdan emin olmak için lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Size sađlık ve esenlikler dileriz.

Sorularınız için lütfen iřitme merkezinizle iletiřime geçiniz.

İşitme cihazına alışmak	1
Önemli bilgiler	2
İşitme sistemini çalıştırmak	5
Pil çeşitleri	6
Pil değiştirmek.....	7
Kulak arkası (BTE) işitme cihazını kalıp ile kulağa takma ve çıkarma işlemi.....	8
Kulak içi (ITE, ITC, CIC, IIC) işitme cihazının kulağa takma ve çıkarma işlemi	9
Earnet BOX cihazın kullanıma hazırlanması	10
Akustik Switch kullanımı ve program değişimi	11
Biyonix / King / TIE X Cihazlar ile Clevereear Bağlantısı	12
İşitme cihazlarını iPhone® ile eşleştirme	14
Earnet TIE / TIE X cihaza genel bakış	17
Earnet TIE / TIE X cihaza filtre ve prob takma işlemi.....	19
Earnet TIE / TIE X cihazın buton özellikleri.....	20
Open Fit ve RIC (RITE) işitme cihazının probla kulağa takılması	21
Program değiştirme butonu	22
Dijital cihazlarda program değiştirme	23
Nano3/Perfect/Smart/Fine Serisi Cihazların Buton Özellikleri	24
Biyonix / King Serisi Cihazların Buton Özellikleri	25
Power Filtrenin cihaza takma/çıkarma işlemi.....	26
Micro Filtreler.....	27
Hoparlöre filtre takma/çıkarma işlemi	28
Aria6 / Royal / Elite / Nano3 / Perfect / Smart / Fine Serileri	
SPn / HPn Cihazların Fiziksel Özellikler	30
Biyonix ve King Serisi SPn / HPn Cihazların Fiziksel Özellikleri	31
Boynuz çıkarma-takma işlemi	32
Openfit hortumu çıkarma-takma işlemi.....	36
Aksesuar ve Ürün Kodları.....	37
Şikayetler, Nedenler, Çözümler	38
Servis ve Garanti	39
Tüketicinin Seçimlik Hakları	40

İşitme cihazına alışmak

Eğer işitme cihazını ilk defa kullanıyorsanız beyni yormadan işitme cihazına alışmanız için, lütfen aşağıdaki belirtilen noktalara uymaya özen gösteriniz.

- 1- Birinci hafta; her gün sakın ortamda 2 saat,
- 2- İkinci hafta; her gün sakın ortamda 4 saat,
- 3- Üçüncü hafta; her gün sakın ortamda 8 saat,
- 4- Dördüncü hafta hergün 6 saat fazla gürültülü olmayan dış ortamda ve 6 saat sakın ortamda,
- 5- Beşinci hafta; gün boyu her ortamda kullanınız.

Deneyimli kullanıcılar işitme cihazlarını sürekli kullanmaya devam edebilirler. *İşitmenizi ve algılamanızı korumak istiyorsanız, işitme cihazınızı sürekli kullanınız.*

earnet işitme cihazları kullanım ömrü, Ticaret Bakanlığı tarafından **5 yıl** olarak belirlenmiştir. Kurumumuz bu süre zarfında yedek parça ve teknik servis hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir.

Not: Bu kullanım kılavuzu bütün **earnet** model işitme cihazları için geçerlidir. **earnet**, bir **ear-teknik** markasıdır.

Cihazın seri/barkod numarası, Lot numarası ve diğer bilgiler cihaz kutusu üzerinde bulunmaktadır.



Önemli Bilgiler...

İşitme cihazınızı kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

- İşitme cihazınızı uzman kişi tarafından programlandıktan sonra kullanınız. Programlanmayan cihazlar işitme duyunuza zarar verebilir.
- Pediatrik grupta olmayan işitme cihazlarımız 36 aydan küçük çocuklara uygun değildir.
Bu cihazlar çocuklar ve bilişsel bozukluğu olan kişiler tarafından kullanıldığında, güvenliği sağlamak için kullanan kişiler her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- İşitme cihazı küçük bir cihazdır ve küçük parçalar içerir. Parçaların yutulması halinde, işitme cihazı veya parçaları boğulmaya neden olabileceğinden derhal bir doktora danışın veya hastaneye başvurun!
- İşitme cihazı pilleri zehirlidir. Yutulmaz ve çiğnenmez. Çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz. Pillerin yutulması halinde lütfen doktora başvurunuz.
- Piller zaman zaman ilaçlar ile karıştırılıyor. Bu nedenle hapınızı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.
- İşitme cihazınız için daima yeni piller kullanın; sızıntı yapmış, oksitlenmiş, son kullanım tarihi geçmiş pilleri ve saat pillerini kesinlikle kullanmayın. Pilde sızıntı olması durumunda, cilt tahrişini önlemek için

hemen yeni pil takın. Kullanılmış pilleri çöpe atmayınız, işitme merkezimize teslim ediniz.

- İşitme cihazınızı kulağınızdan çıkarırken, eğer kulak kablığı yerine prob kullanıyorsanız, çok nadir durumlarda Proplar duyma (kulak) kanalında kalabilir. Güvenli bir şekilde çıkarmak için uzman kişiye başvurunuz.
- Lütfen yalnızca üretici tarafından belirtilen orijinal sarf malzemelerini (prob, hortum vb.) ve aksesuarları kullanın. Açıkça onaylanmamış yetkisiz değişiklikler veya modifikasyonlar, en kötü senaryoda yaralanmaya neden olabilir.
- İşitme cihazınız su, nem ve toza karşı her ne kadar dayanıklı olsa da, cihazınızı yine de mümkün olduğunca koruyunuz. Yüzerken ve duş alırken kullanmayınız.
- Kullandığınız cihaz hassas mikro elektronik parçalardan oluşmaktadır. Kırılma, darbe ve düşmelerden koruyunuz.
- Yüksek nemli alanlardan cihazınızı koruyunuz. Çünkü yüksek nem cihazınızın oksitlenmesine neden olabilir.

- İşitme sisteminizi güneş altına ve ateşe yakın bırakmaktan koruyunuz.
- İşitme cihazını kurutmak için mikrodalga fırın, yüksek kurutucular ve saç kurutma makinelerini kullanmayınız. Cihazı kurutma yöntemleri için lütfen işitme merkezimize danışınız.
- İşitme cihazını kullanmadığınız durumlarda pili çıkarıp, pil kapağını açık bırakınız.
- Cihazınızı kullanmadan önce cihazınızın tam kuru olduğundan emin olunuz. Kullanmadan bir gün öncesinden kurutma tabletleri ile kutu içinde kurutunuz.
- İşitme cihazınızı yere düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Kanal içi cihaz kullanıyorsanız, cihazınızı filtresiz kullanmayınız.
- İşitme cihazınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine (örneğin, trafikte olduğunuzda) bağlı olduğunuzda bunu göz önünde bulundurun. Örneğin, piller bittiyse veya ses giriş çıkış delikleri nem ya da kulak kiri ile tıkanırsa, işitme cihazları çalışmayı durdurabilir.
- MRT veya CI-Röntgen çekimleri cihazınıza zarar verebileceğinden, çekimden önce cihazınızı çıkarıp kapatınız.
- Yüksek elektromanyetik alanlar cihazınızın hassas elektronik parçalarına zarar verebilir. Bu nedenle cihazlarınızı güçlü mıknatısların altına, üstüne veya yanına koymayınız veya beraber taşımayınız.
- Cihazınızı, cep telefonu vb. gibi cihazları şarj etmek için kullanılan kablosuz şarj istasyonlarının üzerine koymayınız.
- İşitme cihazınız uluslararası standartların en katı kurallarına göre geniş kapsamlı parazit testlerine tabi tutulmuştur. Ancak, işitme cihazları ve diğer cihazlar (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları ve mağazaların alarm sistemleri gibi) arasında parazitler oluşabilir. Bu durumla karşılaşırsanız, işitme cihazı ve parazite neden olan cihaz arasındaki mesafeyi artırın.
- İşitme cihazının maksimum ses çıkış seviyesi 132 dB SPL'i aşabilir (IEC711). Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan ürün seçimini ve uygulamasını sadece uzman kişiler yapabilir.

- İşitme cihazlarımız, IEC 60529 (60 dakika boyunca 1 metre derinlikte) standardı kapsamında, IP68 derecesine sahiptir. İşitme cihazlarımız su ve toza karşı dayanıklı olarak üretilmiştir. Cihazınızı sabun, deterjan, kolonya, alkol, parfüm, losyon, güneş yağı, saç boyası, vücut spreyi, saç spreyi, saç jölesi, asitler gibi kimyasal sıvılar ile temas ettirmeyiniz.
- İşitme cihazınızı patlayıcı veya oksijenle zenginleştirilmiş ortamlarda kullanmayın.
- İşitme cihazı, işitme kaybını telafi etmek ve sesi yükselterek kulağa iletmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle sadece amaçlanan kişi tarafından kullanılmalıdır.
- Aktif implante edilebilir bir cihaz kullanıyorsanız, İşitme Cihazlarını ve İşitme Cihazı Aksesuarlarını implanttan en az 15 cm uzakta tutun.
- Aktif bir beyin implantınız varsa, risk değerlendirmesi için lütfen implant üreticisine başvurun.
- İmplantınızda herhangi bir etkilenme yaşarsanız, işitme cihazlarını kullanmayın ve implant üreticisine başvurun.
- İmplantınızdaki etkilenmenin, güç hatları, elektrostatik deşarj, metal dedektörleri vb. nedenler ile de olabileceğini lütfen unutmayın.
- İmplante edilebilir bir cihazınız varsa, mıknatıslar* implanttan en az 15 cm uzakta tutmanızı önerir. (* = Autophone mıknatısı, işitme cihazı kutusu, bir aletteki mıknatıs vb. olarak belirtilebilir.)
- Bu cihazın üreticisi tarafından belirtilen veya verilenler dışındaki aksesuarların, dönüştürücülerin ve kabloların kullanılması, bu ekipmanın elektromanyetik yayılımlarının artmasına veya elektromanyetik bağışıklıklarının azalmasına yol açabilir ve hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Wireless özellikli işitme cihazlarınız 2.4 GHz – 2.48 GHz frekans aralığında çalışır. Uçuş sırasında, uçak içi anonslara dikkat ederek cihazınızın uçak moduna alındığından emin olun.
- Wireless özellikli işitme cihazlarımız ISM bandı 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı vericisi içerir. Radyo vericisi zayıftır ve toplam yayılma gücü her zaman 0 dBm e.i.r.p. 'ye eşdeğer 1,0 mW'nin altındadır.

İşitme Sistemini Çalıştırmak

Cihazı çalıştırmak için lütfen aşağıda yazılı olan notları sırasıyla uygulayınız.

a) Pili hazırlayınız, pilin üzerinde bulunan koruma kağıdını (bandını) çıkarınız. Pilin çalışabilmesi için 2 dakika pili açıkta bırakınız.



b) Pili işitme sisteminize takınız. Cihazı elinize alınız. Pil kapağını açınız, cihazınıza uygun olan pili yerleştiriniz. + (artı) pozisyonuna dikkat ediniz.

c) Cihazın çalışması : Pil kapağının kapanması ile cihazınız çalışacaktır.

d) Cihazın kapanması : Pil kapağının açılması ile cihazınız kapanacaktır.

Pil Çeşitleri

No	Renk	Kullanım Alanları	Ortalama Kullanım Ömrü*
10	 Sarı	 IIC, CIC, ITC, TIE işitme cihazları	4-7 gün
312	 Kahverengi	 Mini BTE, RIC ve ITE cihazlar	7-12 gün
13	 Turuncu	 BTE işitme cihazları	8-16 gün
675	 Mavi	 High Power BTE işitme cihazları	12-25 gün

* Cihaz teknolojisi, uyarılma şekli ve kullanıma göre pil ömrü değişkenlik gösterebilir.

Pil Deęiřtirmek

Cihazınız Pil bitiř sinyalinin haber veren, bip sesleri veya konuşarak bilgi veren sistem ile donatılmıřtır.

- Pil bitmeden önce sinyal ile veya konuşma sesi olarak bilgi verecektir. (Nano3, Perfect, TIE, TIE X, Biyonix, Smart, Fine, King Serileri için geçerlidir.)
- Nano3 ve Perfect Serilerinin pediatrik modellerinde ışıklı buton üzerinden uyarı verir. (Model: SPn, HPn gibi.)
- Pil bitme aşamasına geldiğinde, uyarı sinyali alacaksınız. 10 Dakikada bir 3 bip uyarısı verecektir. (Süre ve bip sayısı cihaz modeline göre deęişiklik gösterebilir.)
- TIE X / Biyonix / King serilerinde, pil seviyesi %15'in altına indiğinde Bluetooth® fonksiyonları cihazın kullanım süresini arttırmak için devre dıřı kalır.

1 Bip	
3 Bip	
6 Bip	

- Yanınızda her zaman yedek pil bulundurmamayı unutmayınız.

NOT: Bu uyarı seslerini duymak istemiyorsanız, işitme uzmanınız tarafından kapatılmasını talep edebilirsiniz.

Kulak arkası (BTE) işitme cihazını kalıp ile kulağa takma ve çıkarma işlemi



Şekil 1



Şekil 2



Şekil 3

Cihazı Takarken:

İşitme cihazının kapalı olması veya ses seviyesinin düşük olması gerekir.

Kalıbı kulağınıza yerleştiriniz. (Şekil 1)

Kalıbı doğru olarak yerleştirdiğinizden emin iseniz, cihazınızın sesini istediğiniz seviyeye ayarlayabilirsiniz. (Şekil 2)

Cihazı Çıkarırken:

İşitme cihazınızı çıkarmak istediğinizde ses seviyesini düşürünüz veya kapatınız.

Kalıbı tutup yavaşça çekiniz. (Şekil 3)

Kulak ii (ITE, ITC, CIC, IIC) iřitme cihazlarını kulađa takma ve ıkarma iřlemi

Cihazı Takarken: Ses seviyesini en dūřuk programa getiriniz. Cihazın n yūzū avucunuzun iine gelecek Őekilde iki parmađınızla tutunuz. Yavař bir Őekilde kanaldan ieri yerleřtiriniz. (Őekil 1)



Cihazı ıkarırken: Ses seviyesini en dūřuk programa getiriniz. Misinadan tutup yavař bir Őekilde ekiniz. Eđer misina takılı deđil ise kenarlardan tutup ekiniz. Cihazı kulaktan ıkarmak iin pil kapađını aıp ekmeyiniz. (Őekil 2-3) Pil kapađını aıp cihazı kapalı konuma getiriniz.



Not: IIC, CIC, ITC, ITE Cihazlarda sađ kulak iin kırmızı, sol kulak iin mavi renk filtre tutacađı kullanılmaktadır. (Őekil 4)



Őekil 4

earnet BOX cihazın kullanıma hazırlanması

Öncelikle kulak kanalınıza uygun probu seçiniz.

1. Cihazı gövde kısmından iyice kavrayınız, cihazın halka kısmını, prob kanalının sonuna kadar ilerleterek yerleştiriniz.



2. Cihazın uç kısmındaki filtrenin prob üzerindeki deliklerden görülene kadar prob kanalında ilerletilmesine dikkat ediniz.



3. Probu'nun iç kısmının sonunda bulunan halka kanalının cihazın üstünde bulunan halkaya yerleştiğinden emin olunuz.



Akustik Switch Kullanımı ve Program Deęiřimi:

(Nano2 ve Nano3/Perfect serileri kulak ii cihazlar iin geerlidir.)

Akustik switch drt farklı Őekilde alıřır.

1-Tekli Vuruő

Kulaęa hafif bir vuruőla aktif hale gelir ve programlara geiő saęlar.

2-iftli Vuruő


İki parmaęınız veya avu iinizle 1-2 saniye aralıklarla hafife vurunuz.

3-Kapat ve Vur

Kulaęınızı avu iinizle 1-2 saniye kapatıp sonra da kulaęınıza hafife vurun. (Nano2 cihazlar iin geerlidir.)


4-Kapalı-Sistem/Devrediő

İhtiya olmadığı durumda iőitme uzmanınız dokunmatik sistemi iptal edebilir. Bu durumda cihazınız tek programda alıőacaktır.

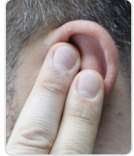

*Drt seenek ierisinden iőitme merkeziniz tercihinize gre cihazınızı ayarlayacaktır.
Tavsiye edilen seenek ise ift vuruő sistemidir.*


Biyonix / King / TIE X Cihazlar ile Cleverear Baęlantısı

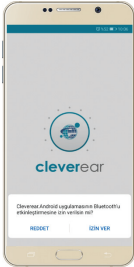

Cleverear BAĞLANTISI


iPhone, iPad ve Android™ cihazlar için geliştirilen **Cleverear** uygulaması işitme cihazlarınızı kolay bir şekilde kontrol edebilmenize olanak sağlar.

Cleverear uygulamasını **App Store**, **Google Play™** ve **AppGallery** üzerinden indirebilirsiniz.

Uygulamayı indirdikten sonra uygulamanın <<  >> ikonuna tıklayarak **Cleverear** uygulamasının kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.





Not: Doğrudan ses akışı şu anda Android tarafından desteklenmiyor.

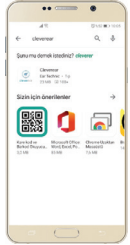

İşitme cihazlarınızı iPhone® ile Eşleştirme

(Cleverear uygulaması kullanmadan direk iPhone, iPad cihazlarınızla işitme cihazlarınızı kullanmak için)

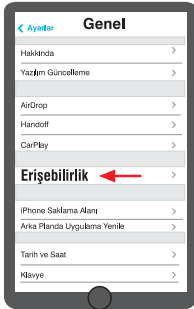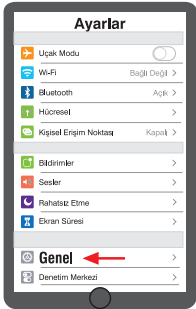

1. iPhone'unuzu açınız ve 'Ayarlar' bölümüne gidiniz. Bluetooth açık olduğundan emin olunuz. Ardından 'Genel' seçeneğini seçiniz.

2. 'Genel' ekranından 'Erişilebilirlik' seçeneğini seçiniz.

3. 'Erişilebilirlik' ekranından 'MFi İşitme Cihazları' seçeneğini seçiniz.



Pil
Kapağı



Pil
Kapağı

4. İşitme cihazının pil yuvasına pili yerleştirin ve işitme cihazını çalıştırınız. Cihazınızı iPhone'unuzun yakınına koyunuz. İşitme cihazları 3 dakika boyunca eşleştirme modunda kalacaktır.



5. iPhone'unuz eşletirilecek işitme cihazlarını bulacaktır. Bulunan cihazlar iPhone listesinde belirecektir. İşitme cihazınızı seçiniz.



6. Eşleşmeyi onaylayınız. Eğer iki işitme cihazınız var ise, her bir cihaz için eşleştirme onayı gerekecektir.

İşitme cihazlarınızı veya Apple® cihazınızı kapatırsanız bağlantınız kesilir. Bağlantıyı yeniden sağlamak için pil kapağını açıp kapatarak işitme cihazlarınızı çalıştırınız. İşitme cihazları Apple cihazınıza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

Wireless özellikli işitme cihazlarımız ve Cleverear uygulaması,

iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2nd generation), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad Air (3rd generation), iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad (7th generation), iPad (6th generation), iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad (8th generation), iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad (5th generation) ile uyumludur.

"iPhone için üretilmiştir" ve "iPad için üretilmiştir" bir elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPad'e bağlanmak üzere tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşıladığı onaylandığı anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve düzenleyici standartlara uygunluğundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPad ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Android, Google Play ve Google Play logosu Google Inc. kuruluşunun ticari markalarıdır.

Bluetooth markası ve logosu Bluetooth SIG' Inc.'nin tescilli markalarıdır. Bu markaların ear-Technic tarafından kullanılması lisans kapsamındadır.

earnet TIE / TIE X Cihaza Genel Bakış

Diğer cihazlardan farklı bir kategorik donanıma sahip olan TIE modüler, yeni bir işitme tarzını ve maksimum işitme zevkini sunuyor.

TIE modüler cihaz, Çip ve pil modülü, Konektör bölümü ve Transdüser kapsülü olmak üzere 3 temel parçadan oluşmaktadır. (bkz. Sayfa 18)


Cihazı kullanmadan önce mutlaka 2. ve 3. sayfadaki önemli bilgileri okuyunuz.

TIE cihazına alışana kadar kullanım süresini aşamalı olarak artırınız. (bkz. Sayfa 01)

Cihazı kullanmadığınız zamanlarda pil kapağını açık bırakınız.




TIE & TIE X Modüler

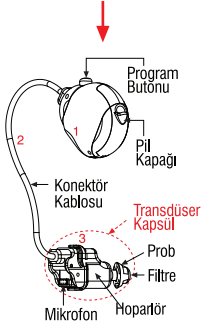

Model: Modüler

- 1- Amplifier Pili Modülü
- 2- Konektör Kablosu
- 3- Transdüser Modülü


TIE & TIE X Yarı Modüler

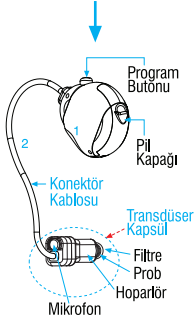

Model: Yarı Modüler

- 1- Amplifier Pili Modülü
- 2- Konektör Kablosu & Transdüser Modül

TIE & TIE X Custom Modüler

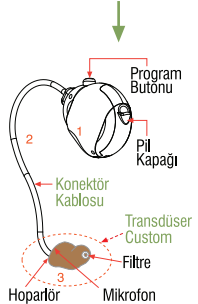


Model: Custom Modüler

- 1- Amplifier Pili Modülü
- 2- Konektör Kablosu
- 3- Transdüser Custom

earnet TIE / TIE X Cihaza Prop Takma İşlemi

Öncelikle kulak kanalınıza uygun probu seçiniz.

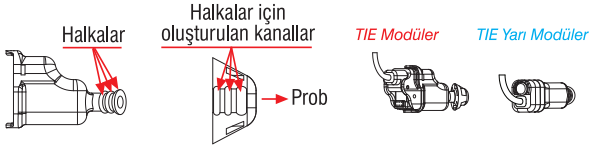

1. Kapsülün halka kısmını, prob kanalının sonuna kadar ilerleterek yerleştiriniz.
2. Kapsülün uç kısmındaki filtrenin prob üzerindeki deliklerden görülene kadar prob kanalında ilerletilmesine dikkat ediniz.
3. Probun iç kısmının sonunda bulunan halka kanalının kapsülün ucunda bulunan halkaya yerleştiğinden emin olunuz.

Prop çeşitleri:



Küçük



Orta



Büyük

earnet TIE / TIE X Cihazların Buton Özellikleri

Program Deęiřtirme: TIE / TIE X model cihazlarda, 1-8'e kadar program seçenekleri mevcuttur. Butona 2 saniye süreyle basıldığında program deęiřimi saęlanır.


Bunu yapılan ayara göre, bip sesi veya konuşma sesi olarak duyarsınız.

Ses Seviyesi Deęiřtirme: TIE / TIE X model cihazlarda butona 1 saniye süreyle basıldığında ses seviyesi deęiřimi saęlanır.

Bunu yapılan ayara göre, bip sesi veya konuşma sesi olarak duyarsınız.

Uçak Modu: TIE X model cihazlarda butona 5 saniye süreyle basıldığında Bluetooth'u devre dıřı bırakarak uçak moduna geçilir. Yeniden Bluetooth'u devreye alabilmek için cihazın pili çıkarılır ve tekrar cihaza takılır.


Not: Program sayısı, pil deęiřtirme süresi ve bip sayısı cihaz modeline göre deęiřiklik gösterebilir.

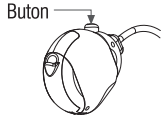

Open Fit ve RIC (RITE) işitme cihazının Probla kulağa takılması



Şekil 1: Kulağınıza uygun probu seçiniz.

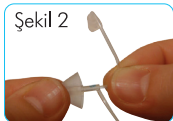


Şekil 2: Probu hortuma takınız.

OpenFit
hortum



RIC hoparlör

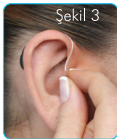

Şekil 3: Cihazı kulağınızın arkasına yerleştiriniz.




Şekil 4: Probu kulağın içine iyice yerleştirdikten sonra ek kavrayıcı hortumun ucunu şekildeki gibi yerleştiriniz. (Ek kavrayıcı hortum sadece Open Fit cihazlarda bulunmaktadır.)



Program deęiřtirme butonu


Program deęiřtirmek iin kullanılır. El aęırlığı ile fazla bastırmayınız. Programı deęiřtirmek iin parmak ucunuzla dokunmanız yeterlidir. Program dğmesi, birden fazla programa sahip cihazlarda bulunmaktadır.

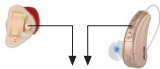

Program dğmesi
(buton)



Program dğmesi
(buton)

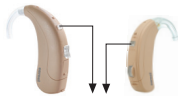

Program dğmesi
(buton)



Dijital cihazlarda program deęiřtirme









Cihazın modeline gre, 1-8'e kadar program seenekleri mevcuttur. İřitme cihazı uzmanınız ihtiyacınıza gre farklı ortamlar iin zel hafıza programları hazırlayacaktır.

Program Bipleri:

Cihazınızda hafıza deęiřtirme sinyalleri bulunur. İřittięiniz bip sayısı, program sayısını vermektedir.

rneęin: 1 bip sesi 1. programda olduęunuzu belirtir. Nano3, Perfect, Smart, Fine Serisi cihazlarda ise sinyal sesine ek olarak konuřma sesi ile de bilgi verilmektedir.

rneęin; konuřma ile program 1, program 2 vs. gibi.

1 Bip/1.Prog.		4 Bip/4.Prog.		7 Bip/7.Prog.	
2 Bip/2.Prog.		5 Bip/5.Prog.		8 Bip/8.Prog.	
3 Bip/3.Prog.		6 Bip/6.Prog.			

Nano3/Perfect/Smart/Fine Serisi Cihazların Buton Özellikleri

Program Deęiřtirme:

1-8'e kadar program seenekleri mevcuttur. Kanalii, RIC, FO model cihazlarda, Butona 2 saniye sureyle basıldıęında program deęiřimi saęlanır.

SPn, HPn model cihazlarda ise program butonuna 1 saniye basıldıęında program deęiřimi saęlanır.

Bunu yapılan ayara gore, bip sesi veya konuřma sesi olarak duyarsınız.

Ses Seviyesi Deęiřtirme:

Kanalii, RIC, FO model cihazlarda butona 1 saniye sureyle basıldıęında ses seviyesi deęiřimi saęlanır.

SPn, HPn model cihazlarda ise ses seviyesi deęiřimi Ses Kontrol butonu ile saęlanır.

Bunu yapılan ayara gore, bip sesi veya konuřma sesi olarak duyarsınız.

Biyonix / King Serisi Cihazların Buton Özellikleri

Program Deęiřtirme:

1-8'e kadar program seenekleri mevcuttur. SPn, HPn model cihazlarda program deęiřimi Ses Kontrol +/-butonuna **2 saniye** basılarak saęlanır.

Bunu yapılan ayara gre, bip sesi veya konuřma sesi olarak duyarsınız.

Ses Seviyesi Deęiřtirme:

SPn, HPn model cihazlarda ses seviyesi deęiřimi Ses Kontrol butonuna **1 saniye** basılarak saęlanır.

Bunu yapılan ayara gre, bip sesi veya konuřma sesi olarak duyarsınız.

Uak Modu:

SPn, HPn model cihazlarda Ses Kontrol + butonuna **5 saniye** sreyle basıldıęında bluetooth'u devre dıřı bırakarak uak moduna geilir.

Yeniden Bluetooth'u devreye alabilmek iin cihazın pili ıkarılır ve tekrar cihaza takılır.

Power filtrenin cihaza takılma işlemi:


- 1- Cihazı görüldüğü pozisyonunda tutunuz.
- 2- Fitre ucuna hafif bastırınız. Filtrenin cihazınızın ağzına yapıştığını göreceksiniz.
- 3- Filtrenin tam yerine oturduğundan emin olmak için lütfen kontrol ediniz.



Filtreyi cihazdan çıkarma işlemi:

Kutunun içinde olan boş yuvaya basınız, filtrenizin çıktığını göreceksiniz.

Her hangi bir terslik olması durumunda tırnak ucuyla hafif çekiniz.

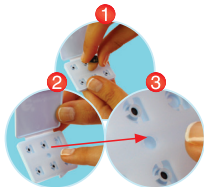

FİLTRE ÇEŞİTLERİ



150 micron



100 micron



50 micron

Micro Filtreler

(TIE, BOX, RIC (RM, RS), ITC, CIC ve IIC cihazlar için geçerlidir.)

- TIE, RIC ve kanal içi cihazları için geliştirilen Eartechnic etkili koruma filtreleri su, ter ve kulak kirine karşı yüksek koruma sağlar.
- Etkili koruma altına alınan hoparlörün performansı düşmeden cihazınızı yıllarca kullanmanıza fırsat sunar.
- Etkili filtre kullanımıyla, hoparlörün içine sıvının girmesine karşı perde görevini yaparak, cihazın kullanım ömrünü uzatmaktadır. Cihazın teknik servisine gönderilmesini ve masrafların çıkmasını azaltmaktadır.
- Kullandığınız filtre sektörde kullanılan en etkili koruma yeteneğine sahip bir filtredir. Doğru ve sürekli kullanmanız halinde cihazın performansına önemli derecede katkı sunacaktır.



Filtre Çubuğu



Hoparlöre Filtre Takma İşlemi:

Filtre çubuğunun ucundaki hazır takılı beyaz filtreyi şekilde görüldüğü gibi cihazın uç kısmındaki kanalın içine yerleşene kadar itiniz. Filtrenin yerleştiğinden emin olduktan sonra filtre çubuğunu yavaşça çekiniz.

Yanlış kullanmanız halinde filtre perdesi yırtılır ve filtre işlevsiz kalır.

Hoparlörden Filtre Çıkarma İşlemi:

Filtre çubuğunun diğer ucundaki sivri kısmı cihazda takılı olan filtrenin kanalına yerleştiriniz. Sivri ucun iyice yerleştiğinden emin olduktan sonra filtreyi çıkarmak için filtre çubuğunu yavaşça çekiniz.

Prop çeşitleri:



Küçük




Orta




Büyük

Filtre takma işleminden sonra, kulağınıza uygun bir prop seçerek cihazınıza takınız.

Hoparlöre Filtre Takma İşlemi

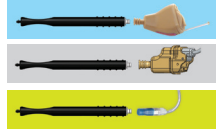

Hoparlörden Filtre Çıkarma İşlemi

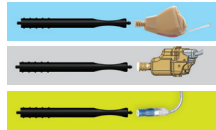

LÜTFEN DİKKAT EDİNİZ!


- Filtreye sert bir cisim sokmayınız ve sert bir cisimle temizlemeyiniz. Koruma perdesini zedelediğinizde filtrenin koruma etkisi kaybolur.
- Aşırı ter ve nemden filtrenin koruma perdesinin tıkanması durumunda cihazı kulağınızdan çıkarıp 10-15 dakika bekletiniz veya kurutunuz.
- Hijyen açısından haftada bir filtrenizi değiştiriniz.
- Cihazınızın günlük bakımını yaptırınız.
- İşitme cihazınızı hijyenik temizleme ve kurutma ürünleriyle bakıma alınız.
- İşitme cihazınızı alkolle ve cilde dost olmayan malzeme ile temizlemekten kaçınınız.

UYARI:


- 1-Lütfen filtreyi çocuklardan uzak tutunuz.
- 2-Filtreyi ağızınıza almayınız veya filtre çıkarma işlemini dişlerinizle gerçekleştirmeyiniz.
- 3-Filtre değişiminden sonra lütfen ellerinizi yıkayınız.
- 4-Sağ ve sol kulak filtrenizin birini diğerinin yeriyle değiştirmeyiniz. Bir kulakta olan hastalık diğerine geçebilir.

Aria6 / Royal / Elite / Nano3 / Perfect / Smart / Fine Serileri SPn / HPn Cihazların Fiziksel Özellikleri


(SPn model cihazlar için geçerlidir.)

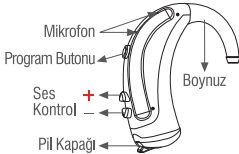


(Nano3/Perfect Pediatri SPn model cihazlar için geçerlidir.)

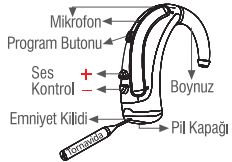

(HPn model cihazlar için geçerlidir.)

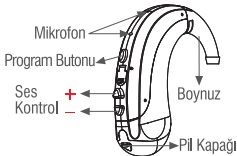


(Nano3/Perfect Pediatri HPn model cihazlar için geçerlidir.)

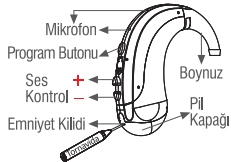

Biyonix ve King Serisi SPn / HPn Cihazların Fiziksel Özellikleri


(SPn model cihazlar için geçerlidir.)

Ses Kontrol / Program Değişimi / Uçak Modu +
Ses Kontrol / Program Değişimi -
Pil Kapağı

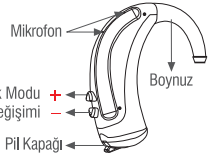

(HPn model cihazlar için geçerlidir.)

Ses Kontrol / Program Değişimi / Uçak Modu +
Ses Kontrol / Program Değişimi -
Pil Kapağı

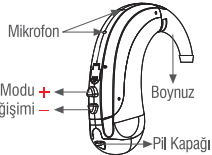


Boynuz Çıkarma-Takma İşlemi:

(Tüm SP_n model cihazlar için geçerlidir.)


Çıkarma İşlemi:

Boynuzu yandaki resimlerde gösterildiği gibi ok yönünde çevirerek çıkartınız. (Şekil 1-2)

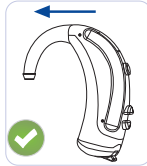

Takma İşlemi:

Boynuzu, ok işareti yönünde iterek yerine oturtunuz. (Şekil 3)

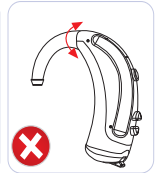

Boynuzu, kesinlikle çevirerek çıkartmayınız. (Şekil 4)

Boynuz Çıkarma-Takma İşlemi:

(Tüm HPn model cihazlar için geçerlidir.)

Çıkarma İşlemi:

Boynuzu yandaki resimde gösterildiği gibi ok yönünde/ sola çevirerek çıkartınız. (Şekil 1-2)



Boynuzu kesinlikle çekerek çıkarmayınız.

Takma İşlemi:

Boynuzu yandaki resimde gösterildiği gibi ok yönünde/ sağa çevirerek takınız. (Şekil 3-4)



Boynuz Çıkarma-Takma İşlemi:

(Tüm F model cihazlar için geçerlidir.)

Çıkarma İşlemi:

- 1- Pim aparatı ile, boynuzu tutan pimi iterek çıkarınız. (Şekil 1)
- 2- Şekil 2'de görüldüğü gibi boynuzu çekerek çıkartınız.

Boynuzu, kesinlikle çevirerek çıkartmayınız.

Takma İşlemi:

- 1- Boynuzu ok yönünde ileri doğru iterek yerine oturtunuz. (Şekil 3)
- 2- Pim aparatı ile pimi iterek yerine oturtunuz. (Şekil 4)



Boynuz Çıkarma-Takma İşlemi:

(Tüm SM, SP model cihazlar, Opera Serisi 31, 31P, 34, 34P, 31T, 61T (Opsiyonel Kabin) ve Optima 31T model cihazlar için geçerlidir.)

Çıkarma İşlemi:

Boynuzu yandaki resimlerde gösterildiği gibi ok yönünde çekerek çıkartınız. (Şekil 1-2)



Takma İşlemi:

Boynuzu, ok işareti yönünde iterek yerine oturtunuz. (Şekil 3)

Boynuzu, kesinlikle çevirerek çıkartmayınız. (Şekil 4)





OpenFit Hortumu Çıkarma-Takma İşlemi:

(Tüm FO model cihazlar için geçerlidir.)



Çıkarma İşlemi:

- 1- Pim çıkarma aparatı ile, Open Fit hortumu tutan pimi iterek çıkarınız. (Şekil 1)
- 2- Open Fit hortumu, Şekil 2'de gösterildiği gibi çıkartınız.

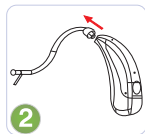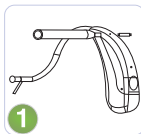

Takma İşlemi:

- 1- Open Fit hortumu ok yönünde ileri doğru iterek yerine oturtunuz. (Şekil 3)
- 2- Pim aparatı ile pimi iterek yerine oturtunuz. (Şekil 4)

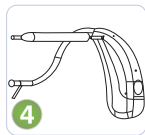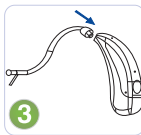

Pim Aparatı

Aksesuar Ürün Kodları

150-9501011	İşitme Cihazı Pili 10 DS
150-9501012	İşitme Cihazı Pili 13 DS
150-9501013	İşitme Cihazı Pili 312 DS
150-9501014	İşitme Cihazı Pili 675 DS
450	Trimmer Tornavidası
493	Pim Çıkarma Aparatı (3x35mm)
D01-510624	Power Filtre (50 Micron / 6 lı) - TR
D01-510625	Power Filtre (150 Micron / 6 lı) - TR
D01-510626	Power Filtre (100 Micron / 6 lı) - TR
D01-810100	Micro Filtre
D01-810104	Filtre Çıkarma Aparatı
K06-3126058	Internal Wax Filtre (150 Micron / 16 lı) - TR
R20-9102082	RIC Prop 5mm
R20-9102083	RIC Prop 7mm
R20-9102084	RIC Prop 10mm
R20-9102085	RIC Prop 12mm
R20-9102086	Kapalı Double Prop 11mm
R20-9102087	Kapalı Double Prop 13mm
R20-9102088	Kapalı Double Prop 14mm

Şikayetler	Nedenler	Çözümler
Ötme Var	• Kalıp küçülmüştür ya da sorunludur	• Kalıbı yenileyiniz.
	• Cihaz/Kalıp kanala oturmamıştır	• Cihaz kulağınıza tam oturmamış olabilir, düzgün yerleştiriniz.
	• Ses yüksek olabilir	• Sesi kısınız.
	• Kalıp zedelenmiş ya da hortum kopmuş olabilir	• Kalıbı yenileyiniz, hortumu değiştiriniz.
	• Boynuz gevşemiştir.	• Boynuzu yerine iyice oturtunuz.
	• Cihazda teknik bir sorun olabilir	• Yetkili servise götürünüz.
Kulakta acı var	• İltihaplı olabilir veya kalıp kanalı zorlamıştır.	• Doktora veya İşitme merkezine başvurunuz.
Ses yok, Ses gelip gidiyor.	• Pil yanlış takılmıştır	• Pili doğru takınız.
	• Pil kapak açıktır	• Pil kapağını tam kapatınız.
	• Pil takılmamış olabilir	• Pil takınız.
	• Pil bitmiş olabilir	• Yeni pil takınız.
	• Hortum/Prob/Filtre tıkanmıştır	• Hortum/Prob/Filtreyi değiştiriniz
	• Kontaklarda temassızlık olabilir	• Kontakları düzeltiniz.
	• Kontaklar kirlenmiş ya da oksitlenmiştir.	• Kontakları temizleyiniz.
Pil erken bitiyor	• Cihaz kullanılmadığı zaman açık kalmıştır	• Cihazı kullanmadığımız zaman kapalı tutunuz.
	• Pil eskidir	• Pil paketinin tarihine bakınız.
	• Teknik sorun var.	• Pil ömrünü not alıp, işitme merkezimize bildiriniz. Yetkili servise gönderiniz.
Sesler kısık, zayıf, titrek, bozuk, parazitli	• Kablo kopmuştur	• Yetkili servise götürünüz.
	• Hoparlör bozulmuştur	• Yetkili servise götürünüz.
	• Pil paslanmış, kirlenmiş olabilir	• Yeni pil takınız.
	• Hortum yırtılmıştır	• Hortumu değiştiriniz.
	• Cihaz nemde kalmıştır	• Cihazı kurutunuz.
	• Mikrofon filtresi tıkanmıştır.	• Filtreyi değiştiriniz.

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI:

Ear Teknik İşitme ve Odiometri Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yeşilköy Mh. Ş. Özcan Çanık Sk.
No.2A, 34149 Bakırköy/İstanbul
Tel. +90 212 557 91 68
Fax. +90 212 505 08 40

Siser İşitme ve Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fahrettin Altay Mh. İnönü Cd. No.865/A Üçkuyular Karabağlar/İzmir
Tel.+90 232 247 25 15

Siser İşitme ve Cihazları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Fidanlık Mh. Mitatpaşa Cd. No.29/2 Yenışehir/Ankara
Tel. +90 312 268 80 00

Servis ve Garanti:

- **earnet** size kapsamlı küresel garanti vermektedir. Garanti işitme sistemini satın alış tarihinden itibaren başlar.
- Garanti süreleri ülkeler bazında değişebileceğinden lütfen işitme merkezinizden garanti ve servis hakkında detaylı bilgi alınız. Garanti sadece fabrikasyon hatalarına karşı verilmektedir.
- Kullanım hatalarından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamında değildir. Örneğin; yetkili teknik servis dışında cihaza müdahaleden kaynaklanan hatalar, aşınma, kırılma, yanlış kullanımdan kırılan parçalar, kimyasal etkiler, cihazı suya (*su ile temasından kaynaklanan bozulmalar*) daldırmak, havuzda veya denizde yüzmek gibi.

Türkiye İçin Ek Özel Şartlar:

- 1- İşitme cihazınız fabrikasyon hatalarına karşı **2 yıl sınırlı garanti** kapsamındadır.
- 2- İşitme cihazı tamir-bakım süresi azami **20 iş günüdür**.
- 3- İşitme cihazları kullanım ömrü Ticaret Bakanlığı tarafından **5 yıl** olarak belirlenmiştir. Kurumumuz bu süre zarfında yedek parça ve teknik servis hizmeti vermeyi taahhüt etmektedir.
- 4- Garanti kapsamında bulunan cihazların anzasının **10 iş günü** içerisinde giderilmemesi halinde firmamız, cihazın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir cihazı kullanıcının kullanımına tahsis etmeyi taahhüt eder. Benzer özelliklere sahip başka bir cihazın kullanıcı tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur.
- 5- Garantili satılan cihazların garanti süresi cihazın teslim tarihi ile başlar ve bu sınırlı garanti sadece işitme cihazınızın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar. Pili, hortum, prob, filtre vb aksesuarlar ile kalıp, kanal içi cihazlar için yapılan montaj bu sınırlı garanti kapsamına dahil değildir.
- 6- İşitme cihazının kullanım kılavuzunda belirtilen hususlara aykırı kullanılması, bakımlarının yapılmaması veya yanlış yapılmasından kaynaklanana arızalar, kırılma, zedelenme ve aşınmalar (kulak arkası kabin, pil kapağı, kanal içi kalıp, boynuz, potans, trimer, butonlar vb) bu sınırlı garanti kapsamı dışındadır.
- 7- İşitme cihazının marka, model, seri numarası, lot ve barkod üzerinde herhangi bir değişiklik veya tahribat yapılması durumlarında işitme cihazı garanti dışı sayılır.
- 8- Yetkili servislerimizin dışında cihaza müdahale edilmesi durumunda, cihaz garanti dışı kalır.
- 9- Cihazınızı darbe, düşme, aşırı titreşimden ve yüksek nemli alanlardan koruyunuz. Yürürken, duş alırken kullanmayınız. Bu tür kullanımlardan kaynaklı arızalar bu sınırlı garantiyi geçersiz kılar.
- 10- Cihazın düzenli bakımı ve temizliğinin yapılmamasından kaynaklanan (kulak akıntısı, ter, kir, su vb ile) mikrofon ve hoparlörün tıkanması, arızalanması gibi durumlar bu sınırlı garanti kapsamı dışındadır.
- 11- Cihazın mikrodalga fırın, yüksek gerilim hatları gibi yüksek enerji içeren ortamlara maruz bırakılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, filtresiz veya uygun olmayan filtre ile kullanılması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasarlar (mikrofon, hoparlöre cisimlerin sokulması gibi), işitme cihazları için imal edilmiş piller dışında başka tipte pillerin kullanılması (saat pilleri gibi) bu sınırlı garantiyi geçersiz kılar.

- 12-Uygulayıcı tarafından yapılmış olan yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar bu sınırlı garantiyi geçersiz kılar.
- 13-Servislerimize kargo,nakliye veya posta yoluyla gönderilen cihazlarda nakil sırasında doğacak hasar ve kayıplardan firmamız sorumlu değildir.
- 14-Garanti dışı durumlarda işletme cihazlarının tamiri kabul edilmediği takdirde harcanan zaman ve işçiliğin bedeli tahsil edilir.
- 15-Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonlarımız, garanti süresi içerisinde kullanıcıdan nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edilmez.
- 16-Cihazın tamirinin tamamlandığı tarih kullanıcıya telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir.
- Uyuşmazlık halinde bildirimle ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.
- 17-Kullanıcının bulunduğu yerde yetkili servis istasyonumuzun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, kullanıcıya en yakın yerdeki yetkili servis istasyonumuz sorumludur.
- 18-Kullanım ömrü süresince, cihazın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde cihaza ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya

satıcıya bildirim tarihinde, garanti süresi dışında ise cihazın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Kullanıcı arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirimle ilişkin ispat yükümlülüğü kullanıcıya aittir.

- 19-Cihazın garanti süresi dışında, servis istasyonlarımız tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde kullanıcıdan herhangi bir isim altında ücret istenmez. Kullanıcının cihazı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu kapsam dışındadır.
- 20-Cihazın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için **6 ay** garanti süresi verilir.
- 21-Tamirden çıkan cihazlar **45** gün içerisinde teslim alınmadığı takdirde firmamız sorumlu değildir.
- 22-Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne veya Tüketici Mahkemesi'ne başvurulabilir.

Tüketicinin Seçimlik Hakları:

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onanılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
2. Ücretsiz onanım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.
3. Ücretsiz onanım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurma hakkının tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
4. Ücretsiz onanım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onanım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.
6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Sembollerin Anlamı:



Bu sembol **euro** ürünlerinin medikal ürünler direktifi olan 93/42/EEC şartnamesine uygun olduğunu göstermektedir. CE'nin arkasında yazılı olan rakam ise CE sertifikasını veren kuruluşun numarasıdır.



Bu sembol kılavuz içeriğinin kullanıcı için önemli olduğunu belirtir.



Bu sembol, kullanıcının kullanım kılavuzunda belirlenen uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtir.



Bu sembol, kullanıcı için kullanım kılavuzunun ürün güvenliği ve ürün kullanımı için önemli bilgiler içerdiğini belirtir.



Bu sembol işitme cihazının normal çöp bidonlarına atılmayacağını gösterir. Lütfen kullanmadığınız veya eski cihazlarınızı elektronik çöplere veya işitme merkezlerine teslim ediniz. Düzgün bertaraf etmek sağlığa ve çevreye katkı sağlayacaktır.



Bu sembol, tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını gösterir.



Bu sembol, bu kullanım kılavuzunda tanımlanan ürünlerin EN 60601-1 standardında B Tipi gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir. İşitme cihazının yüzeyi B Tipi uygulanan parça olarak belirtilmiştir.



Bu sembol, işitme cihazının kuru yerde muhafaza edilmesini ve yağmurda kullanılmaması gerektiğini belirtir.



Bu sembol, tıbbi cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog numarasını gösterir.



Bu sembol, işitme cihazının güneş ışığından uzak tutulması gerektiğini belirtir.

earnet®

işitme sistemleri

Türkiye Satış Ofisi | Üretici Firma



EAR TEKNİK İŞİTME ve ODİOMETRİ CİHAZLARI
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Yeşilköy Mah. Şehit Özcan Canik Sok.
No.2/5, 34149, Bakırköy/İstanbul
Tel.+90 212 557 91 68



Karamehmet Mah. Adnan Arısoy Bulvarı,
Avrupa Serbest Bölgesi, No.13/305, 59930
Ergene-Tekirdağ/Türkiye | www.eartechnic.com

Avrupa Ofisi



Mühlengrund 2, 45355
Essen / Germany
kontakt@eartechnic.com
eartechnic.com

EC REP

Basım Tarihi:07/09/2022

earnet, bir ear-teknik markasıdır.