



ConnectLine

KULLANMA KILAVUZU BAĞLANTI KURMA ADIMLARI



İçindekiler:

Kullanım amacı	1
Aksesuarlar	2
Cihazın şarj edilmesi	2
ConnectLine'nın açılması ve kapatılması.....	2
ConnectLine'nın hazırlanması	3
İşitme cihazının hazırlanması	5
ConnectLine ile ses aktarılması	6
Temizlik ve bakım.....	6
Önemli bilgiler	6
Genel önlemler	7
Güç kaynağı uyarıları.....	8
Pil uyarıları	8
Yetkili servis ve garanti	9
Şikayetler / Nedenler / Çözümler.....	9
Sembollerin anlamı	10

Hoş geldiniz

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür eder, ConnectLine satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.

ConnectLine, konuşma ve sesi doğrudan işitme cihazına aktaran konuşma ve ses aktarıcısıdır.

Tek bir konuşmacı tarafından takıldığında birebir iletişimi desteklediği gibi birden fazla konuşmacıdan gelen konuşmayı alan bir masa mikrofonu çözümü olarak da kullanılabilir.


Bu kullanıcı kılavuzu, ConnectLine cihazınızın nasıl kullanılacağına ilişkin talimatlar içerir. ConnectLine cihazınızdan tam olarak yararlanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun.



Kullanım amacı



ConnectLine, farklı ses kaynaklarından gelen sesin, 2.4 GHz wireless ile doğrudan işitme cihazına aktarılmasını sağlar.

ConnectLine, uzak ve ya gürültülü bir ortamda bulunan bir konuşmacıya takılarak bir dinleme cihazı görevi görür. İşitme cihazı kullanıcılarının konuşmayı takip etmelerini veya diğer ses sinyallerini dinlemelerini sağlamak için kullanılır.

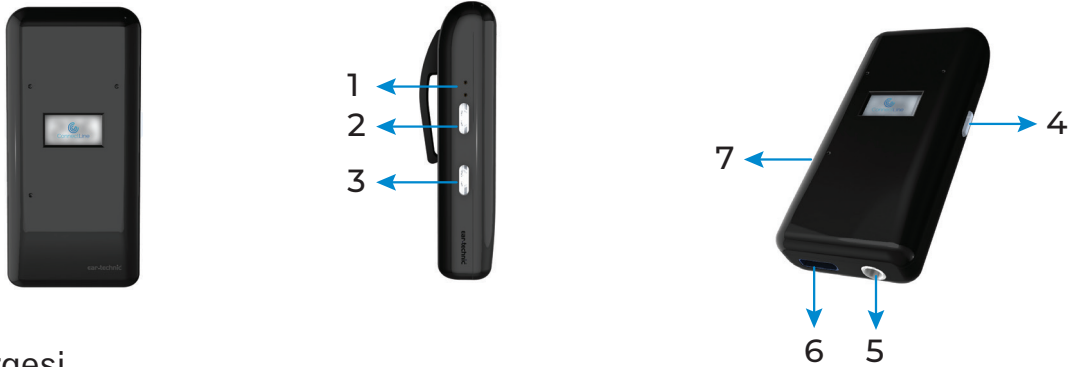

1. Şarj Göstergesi
2. + Yön Tuşu
3. - Yön Tuşu
4. Menü Tuşu
5. Jack Girişi (3.5mm Jack)
6. Şarj Girişi (Type-C)
7. Mikrofon Ses Girişi

Aksesuarlar

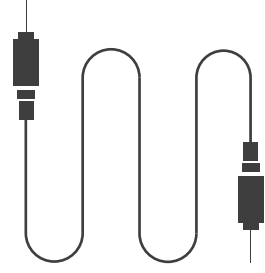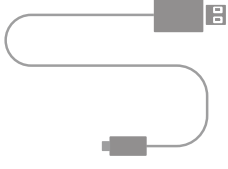

Adaptör çıkış voltajı: 5 VDC, 1 A

Adaptör giriş voltajı: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,2A

ConnectLine giriş voltajı: 5 VDC, 1A

USB kablo özellikleri: 5V min. 1A, USB-A'ya USB-C, maksimum uzunluk 3m

Jack Kablosu: ConnectLine girişi 3.5mm jack, audio kablo

Cihazın Şarj Edilmesi

ConnectLine cihazınızın şarjı ekran üzerindeki batarya göstergesinden takip edilir. Batarya göstergesinde, bataryanın azaldığını gördüğünüzde cihazınızı şarj etmelisiniz. Şarj kablosunun USB-C kısmını ConnectLine'a takınız. USB-A ucunu ConnectLine cihazınızın ile verilen güç adaptörüne takınız. Cihazınızı şarj olması için taktığınızda cihazın şarj göstergesi kırmızı yanar ve cihazın şarj olmaya başladığını gösterir. Cihazın şarj olduğunu ekrandaki batarya göstergesinden takip edebilirsiniz.



ConnectLine'nın Açılması ve Kapatılması


1.Cihazın Başlatılması: Cihazın Menü tuşuna 1 sn basılı tutulur ve cihaz açılır.

2.Cihazın Kapatılması: Cihaz ana ekrandayken menü tuşuna 6 sn basılı tutularak cihaz kapatılır.

ConnectLine'nın Hazırlanması


1.Cihaz Kanal Ayarının Yapılması:

Cihazın menü tuşuna basılır. Yön tuşlarına basılarak ekranda **“Channel”** yazan ekran bulunur. Tekrar menü tuşuna basılarak Channel menüsüne girilir. Yön Tuşları kullanılarak istenilen kanal ayarı yapılır. Ana ekrana geçiş yapmak için menü tuşuna basılarak bir önceki menüye dönülür. Yön tuşları kullanılarak **“Main”** ekranı bulunur. Tekrar Menü tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

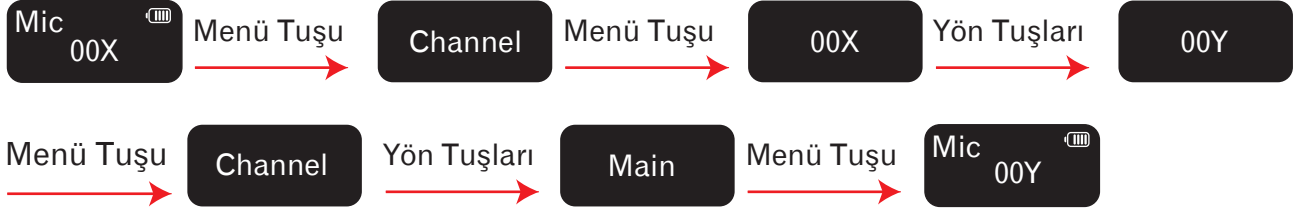


2.Cihazın Mod Ayarının Yapılması:

Cihazın menü tuşuna basılır. Yön tuşlarına basılarak ekranda **“Mode”** yazan ekran bulunur. Tekrar menü tuşuna basılarak Mode menüsüne girilir. Yön Tuşları kullanılarak istenilen Mode ayarı yapılır. Ana ekrana geçiş yapmak için menü tuşuna basılarak bir önceki menüye dönülür. Yön tuşları kullanılarak **“Main”** ekranı bulunur. Tekrar Menü tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

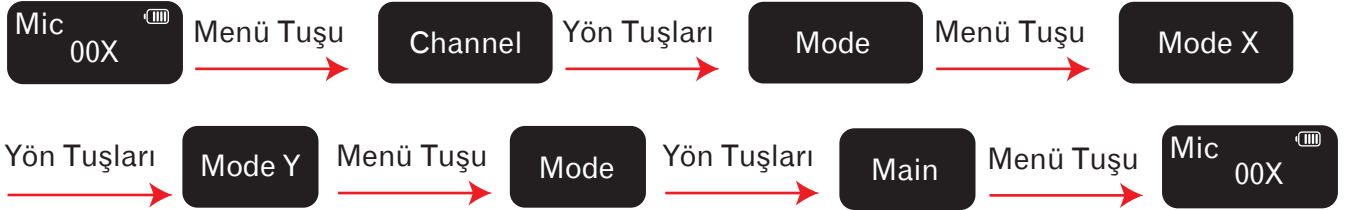


3.Cihazın Ses Kaynağı Ayarının Yapılması:

Cihazın menü tuşuna basılır. Yön tuşlarına basılarak ekranda **“Source”** yazan ekran bulunur. Tekrar menü tuşuna basılarak Source menüsüne girilir. Yön Tuşları kullanılarak istenilen kaynak ayarı (Mikrofon veya jack) ayarı yapılır. Ana ekrana geçiş yapmak için menü tuşuna basılarak bir önceki menüye dönülür. Yön tuşları kullanılarak **“Main”** ekranı bulunur. Tekrar Menü tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

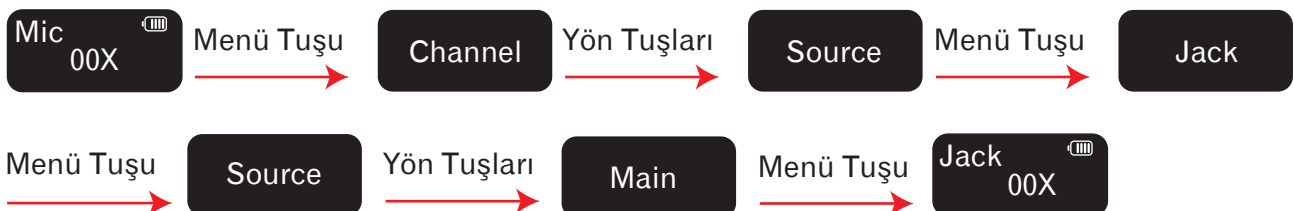

4.Cihazın Mikrofon Kazancının Ayarının Yapılması (*):

Cihazın menü tuşuna basılır. Yön tuşlarına basılarak ekranda “**Mic Gain**” yazan ekran bulunur. Tekrar menü tuşuna basılarak Mic Gain menüsüne girilir. Yön Tuşları kullanılarak istenilen kazanç değeri (+5dB ile +20dB arasında) ayarlanır. Seçilen desibel değerine gelindiğinde menü tuşuna basılarak bir önceki menüye dönülür. Yön tuşları kullanılarak “**Main**” ekranı bulunur. Tekrar Menü tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.

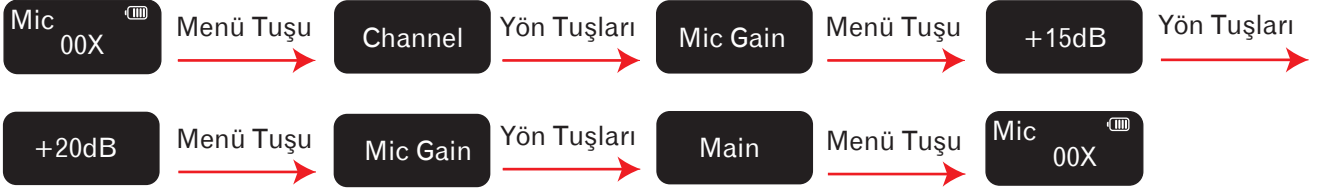

5. Mikrofon ses ayarlarının yapılması:

ConnectLine cihazınızın işitme cihazınıza verdiği sesi yükseltmek veya düşürmek için ConnectLine cihazınızın yön tuşlarını kullanabilirsiniz.



6. Cihaz Menüsünden Ana Ekran Geçiş Yapılması:

Menü ekranından yön tuşları kullanılarak “**Main**” ekranı bulunur. Tekrar Menü tuşuna basılarak ana ekrana dönülür.


(*) Bu özellik cihazın V.1.1 ve sonraki versiyonları için geçerlidir.

İşitme Cihazının Hazırlanması

Cleverear uygulaması ile işitme cihazı bağlandıktan sonra uygulama üzerinden uygun kanal ve mod ayarları yapılarak **ConnectLine** ile aynı kanal ve **Mod** ayarına getirilir ve **ConnectLine** cihaza ses yayınına direk yapmaya başlar.


1. Cleverear Uygulamasında Kanal Ayarının Yapılması

“**Gelişmiş**” ekranına geçin. / “**Stream Adres**” tıklanır. / 1'den 250'ye **ConnectLine** ile kanal ayarlanır. Uygula seçeneği tıklanarak ayar kaydedilir.

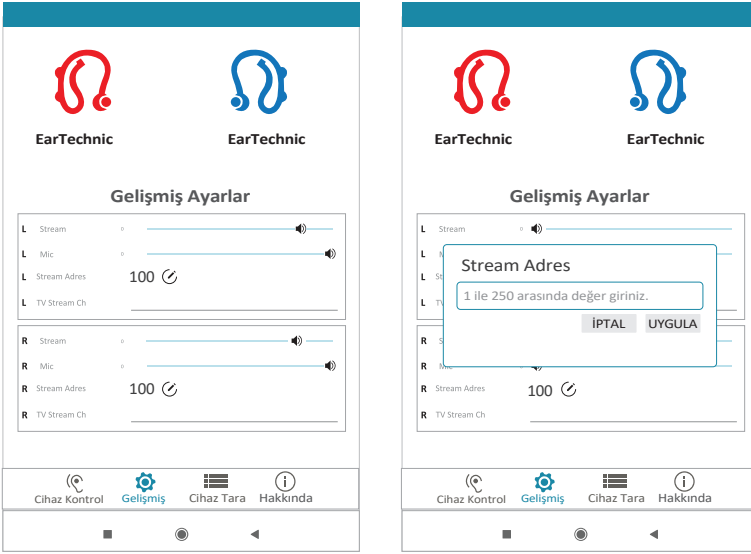

2. Cleverear Uygulamasında MOD Ayarının Yapılması

“**Gelişmiş**” ekranına geçin. / “**TV Stream Ch**” tıklanır.

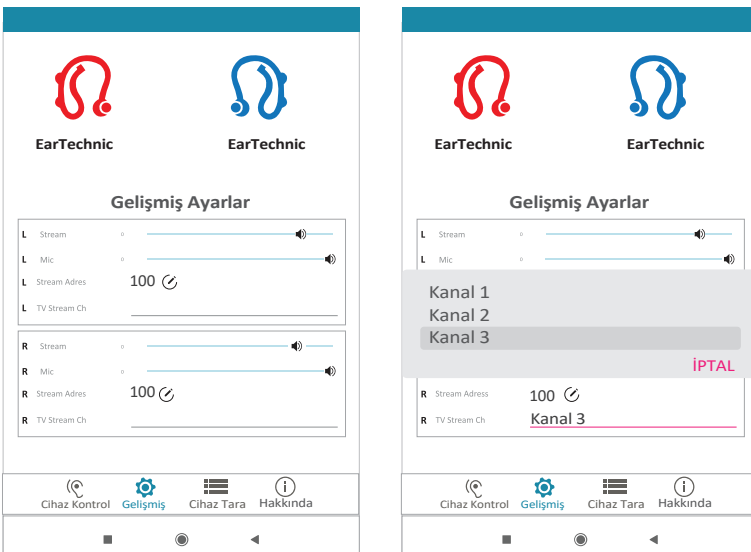

Menüdeki kanallar **ConnectLine** cihazındaki modlara karşılık gelir.

ConnectLine	Cleverear
Mode 1	Kanal 1
Mode 2	Kanal 2
Mode 3	Kanal 3

Bitti seçeneği tıklanarak ayar kaydedilir.

ConnectLine ile Ses aktarımı

ConnectLine cihazından işitme cihazına ses aktarımının yapılabilmesi için yukarıda belirtildiği gibi işitme cihazında ve **ConnectLine**'da kanal ayarları yapılmalıdır. **ConnectLine**'dan işitme cihazına 2 şekilde ses aktarılır;

- a) Mic ayarı devrede iken mikrofon ile ortamdan alınan ses doğrudan işitme cihazına aktarılır.
- b) Jack ayarı devrede iken herhangi bir ses kaynağı çift taraflı jack kablosu ile **Connectline**'a bağlanır ve jack kablosu ile ses kaynağından alınan ses **ConnectLine** üzerinden işitme cihazına aktarılır.

TEMİZLİK VE BAKIM

ConnectLine cihazınızın dışını kuru ve temiz bir bezle temizleyin. Kullanım ömrünü uzatmak için cihazınızı kuru ve temiz tutun.

Mikrofon ve şarj girişlerini atık ve kirden koruyun.

❗ **ConnectLine** cihazınızı temizlemek için sıvı kullanmayın.



ÖNEMLİ BİLGİLER

- Cihaz, tıbbi bir cihazın bir aksesuarıdır ve kendi başına herhangi bir tedavi edici veya teşhis amaçlı kullanıma sahip değildir. İşitme cihazlarına uzak ses kaynağından alınan sesi doğrudan işitme cihazına aktarmak için tasarlanmıştır.
- Cihazınızı evcil hayvanlardan, çocuklardan ve bilişsel, zihinsel veya zihinsel sağlık sorunları olan kişilerden uzak tutunuz.
- Cihazınızı temiz tutun. Isı, nem ve yabancı maddeler performansın düşmesine neden olabilir.
- Cihazınızı temizlemek için su, solvent veya temizleme sıvıları kullanmayınız.
- Ürününüzün hasar görmesini veya yaralanmanızı önlemek için ürününüzü yağmura, neme veya diğer sıvılara maruz bırakmaktan kaçınınız.
- Cihazınızı temiz ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihazınızı fırın veya mikrodalga fırın gibi aşırı ısıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun. Isı kasayı deforme edebilir, elektronik aksamlara zarar verebilir ve yüzeyleri bozabilir.

- ConnectLine, diğer kablosuz aygıtlarla iletişim kurmak için düşük-enerjili yayınlar kullanır. Küçük bir olasılık da olsa, yakındaki elektronik cihazlar etkilenebilir. ConnectLine kullanım sırasında elektromanyetik parazitten etkilenirse, kaynaktan uzaklaşın.
- ConnectLine'ı düşürmeyiniz. Cihazınızı sert bir zemine düşürmek cihazınıza zarar verebilir.
- Ürün aşırı ısınır, düşerse veya hasar görürse, ürünün kablosu veya fişi hasarlıysa veya ürün sıvı içine düşerse, kullanmayı bırakın ve işitme uzmanınıza başvurun.
- ConnectLine'ı patlama riski olan alanlarda (patlama tehlikesi olan madenler veya endüstriyel alanlar, oksijen bakımından zengin ortamlar veya yanıcı anesteziğin kullanıldığı alanlar) veya elektronik ekipmanın yasak olduğu yerlerde kullanmayınız.
- ConnectLine'ı elektronik cihazların kullanılmasının yasak olduğu alanlarda kullanmayın, örn. uçaklar vb.
- Aşağıdakiler yalnızca vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlara (yani kalp pili, defibrilatör vb.) sahip kişiler için geçerlidir:
- ConnectLine'ı aktif implanttan en az 15 cm (6 inç) uzakta tutun. Herhangi bir parazit yaşarsanız, cihazı kullanmayın ve aktif implantın üreticisiyle iletişime geçin. Lütfen, parazite elektrik hatları, elektrostatik deşarj, havaalanı metal dedektörleri vb. neden olabileceğini unutmayın.

GENEL ÖNLEMLER

- Sizi tehlikeli elektrik çarpmasına maruz bırakabileceği ve garantinin sona ermesine neden olabileceği için ConnectLine cihazınızı sökmeye çalışmayınız.
- Bu cihazda herhangi bir değişiklik veya modifikasyon yapmayın.
- ConnectLine'ı açmak ona zarar verebilir. Çözümlemeyen sorunlar ortaya çıkarsa, işitme uzmanınıza danışın.
- ConnectLine yalnızca yetkili bir servis tarafından onarılabilir.
- Yüksek elektromanyetik alanlar, cihazınızın hassas elektronik parçalarına zarar verebilir. Bu nedenle cihazınızı güçlü mıknatısların altına, üstüne veya yanına koymayınız, beraber taşımayınız.
- X-ray radyasyonu (örn. CT taramaları, MRI taramaları) bu cihazın doğru çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Röntgen prosedürlerinden geçmeden önce cihazı KAPATMANIZI ve odanın dışında tutmanızı öneririz.

GÜÇ KAYNAĞI UYARILARI

- Güç kablosunu çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutup çekiniz.
- Asla hasarlı bir kablo veya adaptör kullanmayın.
- Cihazı yalnızca birlikte verilen adaptör ve kablo ile kullanın. Başka bir şarj ekipmanının kullanılması ürüne zarar verebilir.
- Cihazınızı aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklarda şarj etmek kaçının.
- ConnectLine üzerinizdeyken şarj etmeyin.

PİL UYARILARI

- Bu üründe kullanılan pil, yanlış kullanıldığında yangın veya kimyasal yanık riski oluşturabilir.
- Ürünü açmaya veya pili değiştirmeye çalışmayın. Yerleşik ve değiştirilemez. Diğer pillerin kullanılması yangın veya patlama riski oluşturabilir ve garanti sona erecektir.
- Ürününüzdeki pil kullanıcı tarafından çıkarılamaz veya değiştirilemez. Bunu yapmaya yönelik herhangi bir girişim risklidir ve ürüne zarar verebilir.
- Patlayabileceğinden pili evsel atık olarak veya ateşe atmayın.
- Piller hasar gördüğünde patlayabilir.

Servis ve Garanti

ear-teknik, size kapsamlı küresel garanti vermektedir. Garanti işitme sistemini satın alış tarihinden itibaren başlar.

- Garanti süreleri ülkeler bazında değişebileceğinden lütfen işitme merkezinizden garanti ve servis hakkında detaylı bilgi alınız. Garanti sadece fabrikasyon hatalarına karşı verilmektedir.
- Kullanım hatalarından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamında değildir. Örneğin; yetkili teknik servis dışında cihaza müdahaleden kaynaklanan hatalar, aşınma, kırılma, yanlış kullanımdan kırılan parçalar, kimyasal etkiler, cihazı suya (su ile temasından kaynaklanan bozulmalar) daldırmak, havuzda veya denizde yüzmek gibi.

Yetkili Servis:



Ear Teknik İşitme ve Odiometri Cihazları
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Karamehmet Mah. Avrupa Serbest Bölgesi Adnan Arısoy Bul. No:11 İç Kapı No:Z02,
59930 Ergene-Tekirdağ/Türkiye

ŞİKAYETLER	NEDENLER	ÇÖZÜMLER
Bir veya her iki işitme cihazından ses akışında düşüş var.	İşitme cihazı ile ConnectLine arasındaki mesafe menzil sınırında olabilir.	ConnectLine cihazınıza yaklaşın.
	İşitme cihazının pil seviyesi ses akışını desteklemeyecek kadar düşmüş olabilir.	İşitme cihazı pilini değiştirin. Şarjlı bir işitme cihazı kullanıyorsanız işitme cihazınızı şarj edin.
	Eşya, duvar gibi büyük nesnelere cihazlar arasındaki sinyal bağlantısını düşürebilir.	ConnectLine ile işitme cihazlarınız görüş alanı içerisinde olmalıdır.
	ConnectLine ile bağlantı kesilmiş olabilir.	Ses aktarımını yeniden başlatın.
Aktarılan ses kalitesi kötü	ConnectLine cihazınızın şarjı azalmış olabilir.	ConnectLine'ı şarj edin.
Ses çok yüksek	ConnectLine'dan aktarılan ses optimum ayarlanmamış olabilir.	Daha iyi ses kalitesini elde edene kadar ConnectLine'nın + ve - yön tuşlarını kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
Gürültülü ortamlarda sesi duymak zor	ConnectLine ses kaynağı hoparlöre uzak olabilir.	ConnectLine'ı ses kaynağına yaklaştırın.
	ConnectLine mikrofoni giysilerle kapatılmış olabilir.	ConnectLine'nın doğru konumlandırıldığından emin olun.

Sembollerin Anlamı:



Bu sembol kılavuz içeriğinin kullanıcı için önemli olduğunu belirtir.



Bu sembol, kullanıcı için kullanım

kılavuzunun ürün güvenliği ve ürün kullanımı için önemli bilgiler içerdiğini belirtir.



Cihaz RF verici içerir



Bu sembol, kullanıcının kullanım kılavuzunda belirlenen uyarıları dikkate alması gerektiğini belirtir.



Bu sembol, cihazın ateşe atılmaması gerektiğini belirtir.



Bu sembol cihazın normal çöp bidonlarına atılmayacağını açıklar. Lütfen kullanmadığınız veya eski cihazlarınızı elektronik çöplere veya işleme merkezlerine teslim ediniz. Düzgün bertaraf etmek sağlığa ve çevreye katkı sağlayacaktır.



Bu sembol, cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin seri numarasını gösterir.



Bu sembol, bu kullanım kılavuzunda tanımlanan ürünlerin EN 60601-1 standardında B Tipi gerekliliklerine uygun olduğunu gösterir.



Bu sembol, cihazın kuru yerde muhafaza edilmesini ve yağmurda kullanılmaması gerektiğini belirtir



Bu sembol, cihazın tanımlanabilmesi için üreticinin katalog numarasını gösterir.



Bu sembol, cihazın güneş ışığından uzak tutulması gerektiğini belirtir.

Tüketicinin Seçimlik Hakları:

1. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

2. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemli ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

5. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

6. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.



ConnectLine

